

### Einfache Handhabung von Stechhilfe und Lanzette



Drehen Sie das Oberteil der Stechhilfe ab und führen Sie vorsichtig eine Lanzette in die vorgesehene Halterung ein.

Drücken Sie die Lanzette mit Daumen und Zeigefinger zusammen und drehen Sie die Schutzkappe der Lanzette ab. Schrauben Sie das Oberteil jetzt wieder auf.



Durch Drehen der Spitze der Stechhilfe können Sie 5 verschiedene Einstechtiefen einstellen: 1-2 für dünne, 3 für normale und 4-5 für dickere oder verhornte Haut.

Halten Sie das Oberteil der Stechhilfe mit der einen Hand fest. Mit der anderen Hand ziehen Sie gleichzeitig den Schieber des Unterteils bis zum hörbaren Anschlag nach hinten.



Wenn sie den Schieber loslassen, geht er in seine Ausgangsposition zurück. Die Stechhilfe ist jetzt einsatzbereit.

Drücken Sie das Oberteil der Stechhilfe jetzt gegen eine Fingerbeere. Drücken Sie den Auslöseknopf. Die so gewonnene Blutprobe sollte jetzt bereit sein, auf den Teststreifen aufgetragen zu werden. Entfernen und entsorgen Sie die Lanzette.

